





Brugervejledning til Pocket Chamber Mini-Spacer m/ Masker

1. Kontroller at både spacer og maske er ubeskadiget, inklusiv den lille en-vejs ventil inde i spaceren, den fleksible blå gummiventil i bunden af spaceren, samt selve spaceren og masken. Hvis nogen dele er beskadiget skal de udskiftes.

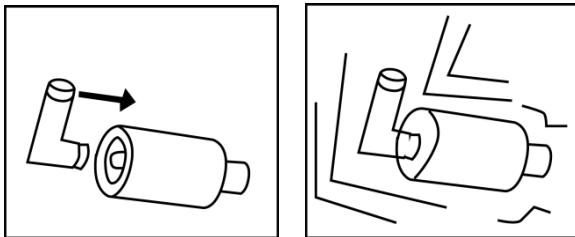


2. Tryk inhalationssprayen ind gennem den fleksible blå gummi ventil i bunden af spaceren. Kontroller at sprayen sidder godt fast ved at ryste spaceren.
3. Spaceren kan eventuelt bruges alene uden maske. Mundstykket placeres da direkte i munden.
4. Hvis der skal bruges maske, monteres denne på spacerens mundstykke. Envejs ventilen skal vende opad. Envejs ventilen sikrer, at brugeren kan ånde ud selvom masken slutter tæt til rundt om både næse og mund.

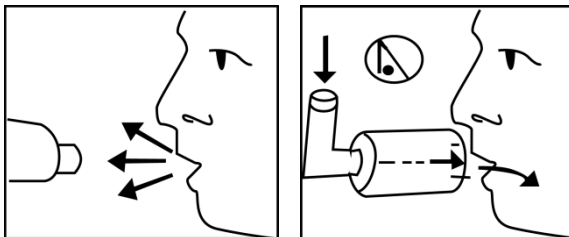

5. Foretag en fuld udånding, og placer mundstykket i munden, eller masken så den slutter tæt til om både næse og mund.
6. Tryk en gang på inhalationssprayen, så der udløses en dosis ind i spaceren.
7. Indånd/inhale samtidig så tilstrækkelig langsomt, at 'fløjte-lyden' ikke høres, da denne indikerer, at der inhaleres for hurtigt.



Brugervejledning til Pocket Chamber m/ masker

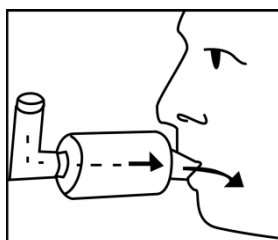

8. Bliv ved at indånde/inhalere fuldt ud, stadig i samme langsomme tempo.
9. Forsøg herefter at holde vejret i 5 til 10 sekunder.
10. Udånd efterfølgende langsomt.
11. Børn og andre som ikke kan styre 'en langsom indånding/inhalation', må i stedet for foretage 5-10 indåndinger/inhalationer for hver dosis inhalationsspray efter nærmere aftale med lægen.
12. Gentag punkt 5. til 11. det antal gange der er aftalt med lægen.

Rengøring

1. Både maske og spacer bør rengøres mindst en gang om ugen. Inden fornyet brug, bør både maske og spacer kontrolleres for eventuelle skader.
2. Masken vaskes i varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel. Skyl grundigt. Herefter lægges masken til at tørre.
3. Spaceren lægges i blød i varmt vand tilsat opvaskemiddel. Efter få minutters opblødning, er det let at fjerne hele den blå gummiventil i bunden. Vask herefter både den blå gummiventil og spaceren så grundigt som muligt. Skyl grundigt. Herefter lægges begge dele til tørre. Inden fornyet brug monteres den blå gummiventil igen.

For yderligere information se nærmere på www.jepsenhealthcare.dk