

# Pocket Chamber

## Anti-statisk aerosol ventilholdekammer

Aerosol ventilholdekammer til brug med inhalatorer til afmålte doser

Navn:

Rum nr.:

Læge:

Anvisninger om medicinering:

Fremstillet for:

**nSpire Health, Inc.**

1830 Lefthand Circle  
Longmont, CO 80501 USA  
+1-303-666-5555

Genbestillingsnummer:

**621-201**

Befuldmaegtigede:

**nSpire Health Ltd.**

Unit 10 Harforde Court  
John Tate Road  
Hertford, SG13 7NW UK  
+44 (0) 1992 526300



[www.nspirehealth.com](http://www.nspirehealth.com)

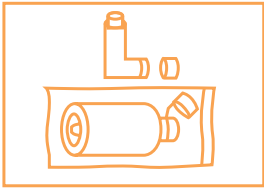
**Indhold:** 1 enhed til en enkelt patient

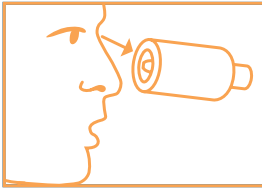
### Anvendes til inhalatorer til afmålte doser

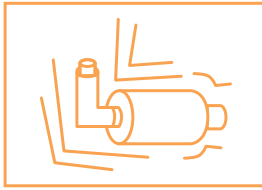
Læs instruktionerne omhyggeligt, inden Pocket Chamber tages i brug.

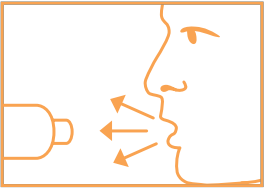
Formålet med Pocket Chamber er at reducere aerosol mediciningsdosen fra inhalatorer til afmålte doser (MDI) ved at sprede store aerosolpartikler, så der opnås en dosis, som kan inhaleres på effektiv vis.

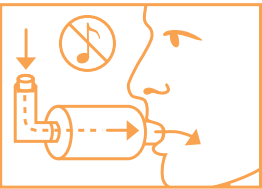
### Anvendelse

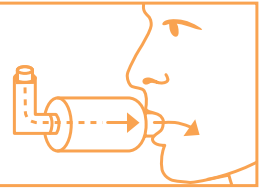
- 

Tag Pocket Chamber ud af posen. Tag hæfterne af både MDI'en og Pocket Chamber.
- 

Undersøg visuelt Pocket Chamber for fremmedlegemer eller skade.
- 

Indsæt MDI'en i den fleksible MDI-ende af Pocket Chamber. Ryst kraftigt.
- 

Udånd dybt og langsomt og anbring derpå Pocket Chamber i munden.
- 

Tryk MDI-beholderen ned og afgiv et enkelt sprøjt ind i Pocket Chamber, mens der inhaleres langsomt, så du ikke aktiverer fløjten.
- 

Fortsæt med at indånde langsomt og fuldt ud.
- 7 Prøv at holde vejret i 5-10 sekunder.
- 8 Ånd langsomt ud.
- 9 Gentag trin 3-8 det antal gange din læge foreskriver.

### Tekniske oplysninger

Pocket Chamber hjælper med at afgive MDI-medicineringen. Pocket Chambers envejsventil reducerer det ikke-respirable (ikke-behandlingsmæssige) antal partikler, som ellers ville blive aflejret i din hals eller mund. Samtidig leverer Pocket Chamber en tilstrækkelig dosis (behandlingsdosis) respirabel MDI-aerosol medicinering, som let inhaleres i lungerne. Denne proces hjælper til at reducere uønskede bivirkninger og til at opnå en effektiv behandling. Hvis du har spørgsmål eller problemer med at bruge Pocket Chamber, skal du kontakte din læge.

### Advarsler og forholdsregler

Pocket Chamber skal udskiftes, hvis:

1. Materialet har revner.
2. Den fleksible MDI-ende er flækket.
3. Pocket Chambers envejsventil er revnet eller forsvundet.
4. Pocket Chamber er beregnet til at blive udskiftet efter 12 måneders brug.

**Forsigtig:** Ifølge amerikansk lovgivning må denne anordning kun sælges af eller på foranledning af en læge.

### Rengøring

Når anordningen bruges gentagne gange, ophobes der pulver fra medicinen på Pocket Chambers indre overflader. Det kan påvirke anordningens virkemåde. Både anordningen selv og MDI-plastknæstykket skal vaskes mindst en gang om ugen med varmt vand og flydende opvaskemiddel. Anbring hele enheden i varmt vand, inden du forsøger at af tage den fleksible MDI-ende. Vask derpå enheden, skyl med varmt, rent vand og lad den lufttørre.